

## 1. POPIS

<b>Produkt</b>	OKM Dekorační lycra
<b>Označení</b>	DS

Dekorační lycra je určena pro dekoraci protetických pomůcek, které se vyrábějí laminací.

## 2. Dostupné formáty:

<b>Tubus šířka 15cm</b>	Doporučeno pro BK lůžka
<b>Tubus šířka 20cm</b>	Doporučeno pro AK lůžka
<b>Manta</b>	Doporučeno pro pomůcku, větší nebo nepravidelného tvaru

Všechny lycry mají šířku 1600 mm.

**Kompatibilita:** Lycry OKM jsou vhodné pro laminaci spolu s textiliemi (Perlón, Dakrón, Nyglass, Kevlar...) nebo s vlákny (uhlíkové či skleněné).

**Personalizace:** Všechny vzory lze upravit nebo personalizovat logem ortopedické dílny či podle návrhu konečného uživatele.

## 3. NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1- Připravte lycru přizpůsobenou pomůcce, která bude laminována, a vyberte nejlepší formát.
- 2- Připravte formu se všemi vnitřními vrstvami.
  - a. Lze také dekorovat vnitřek pomůcky, pokud lycru otočíte.

- 3- Aplikujte dekorativní Lycra přezkoumáním:
  - a. Správná poloha švu
  - b. Správné umístění hlavního motivu / loga
  - c. Absence vrásek
- 4- Naneste PVA povlak a proveďte laminování bez pigmentu