



Návod k použití









## Obsah


	Tabulka velikostí	2
CS	Návod k použití	9

## Tabulka velikostí

	US M	US W	1	2
SA	2.5 - 4	4 - 5.5	10'' - 12.5''	3'' - 3.5''
S	4 - 6	5.5 - 7.5	10'' - 12''	3.25'' - 4''
MA	5 - 8.5	6.5 - 10	11.5'' - 14''	3'' - 3.75''
M	6 - 9.5	7.5 - 11	11'' - 13.5''	3.5'' - 4.25''
LA	8 - 11.5	9.5 - 13	13'' - 16''	3.25'' - 4''
L	9 - 12	10.5 - 13.5	12.5'' - 15.5''	3.75'' - 4.5''
XL	11.5 +	13 +	14.5'' +	4.25'' +

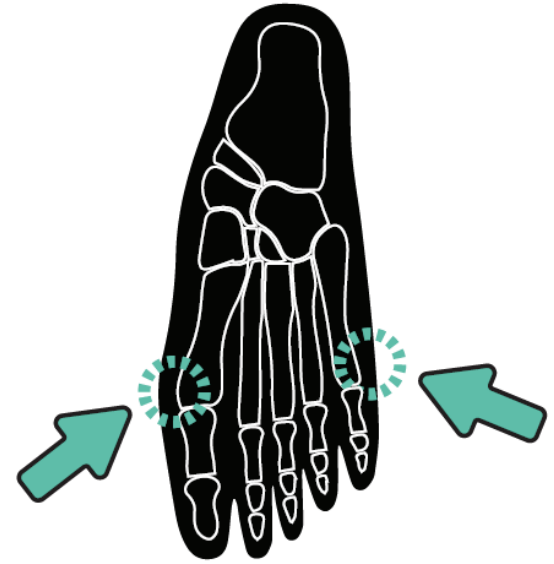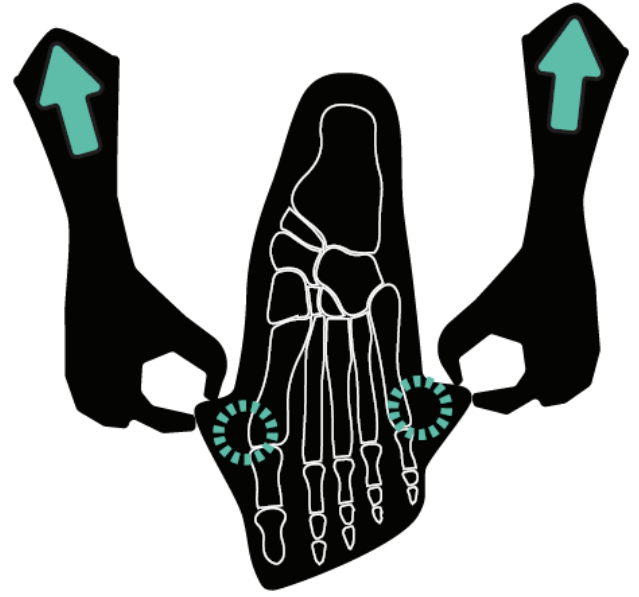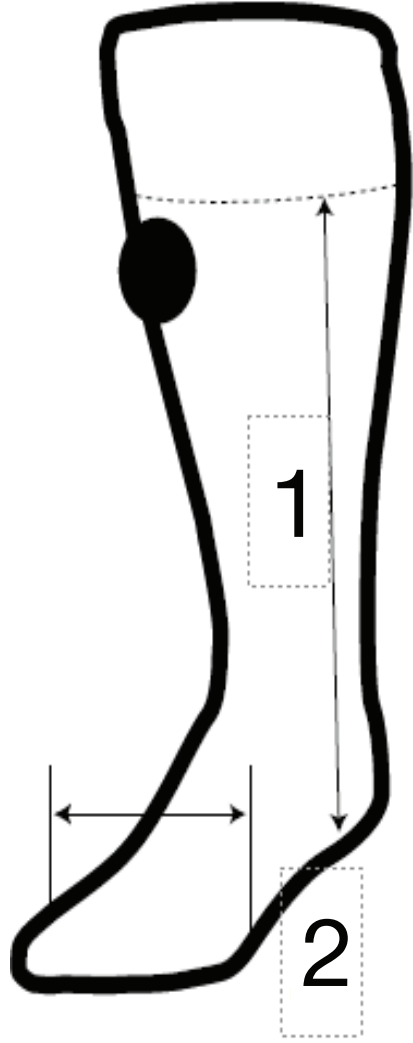

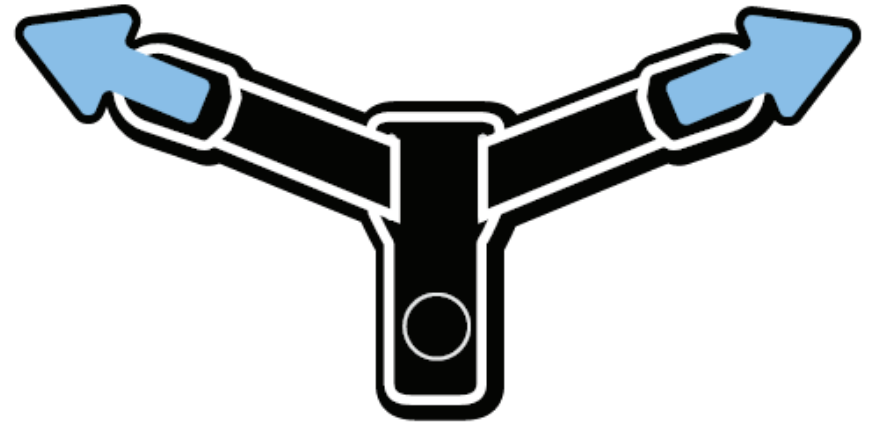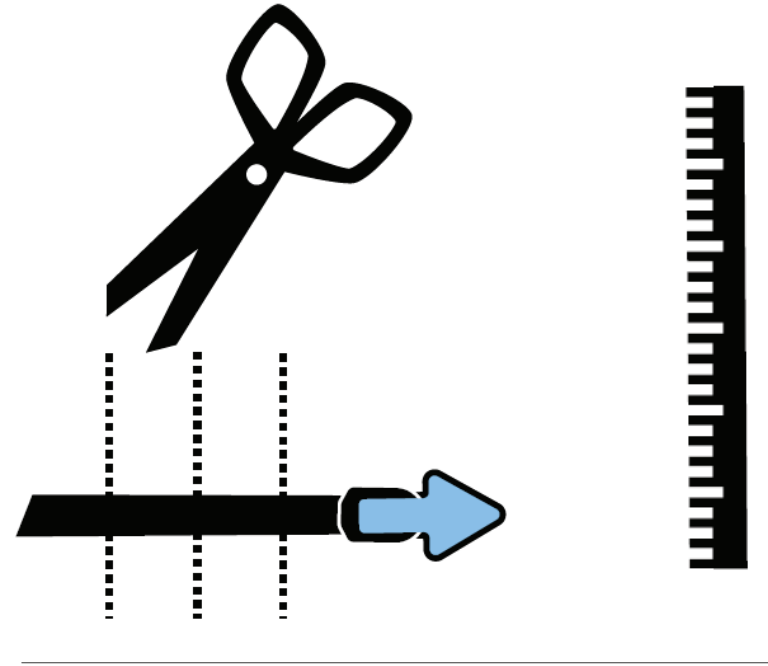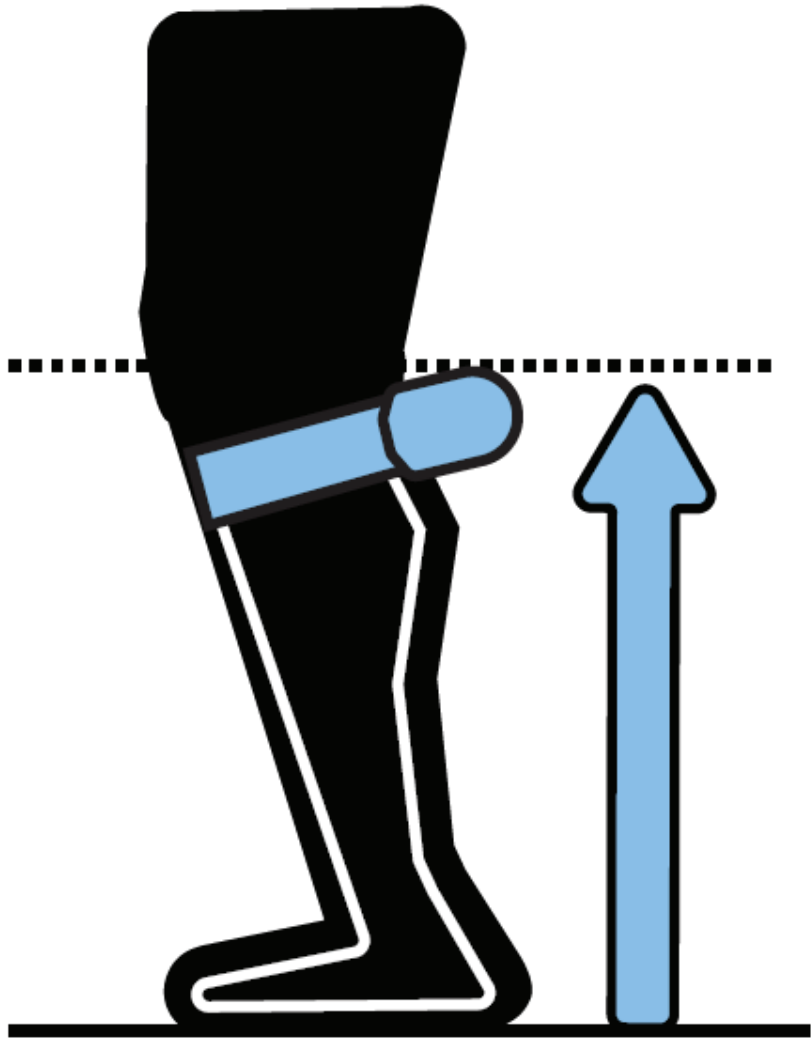

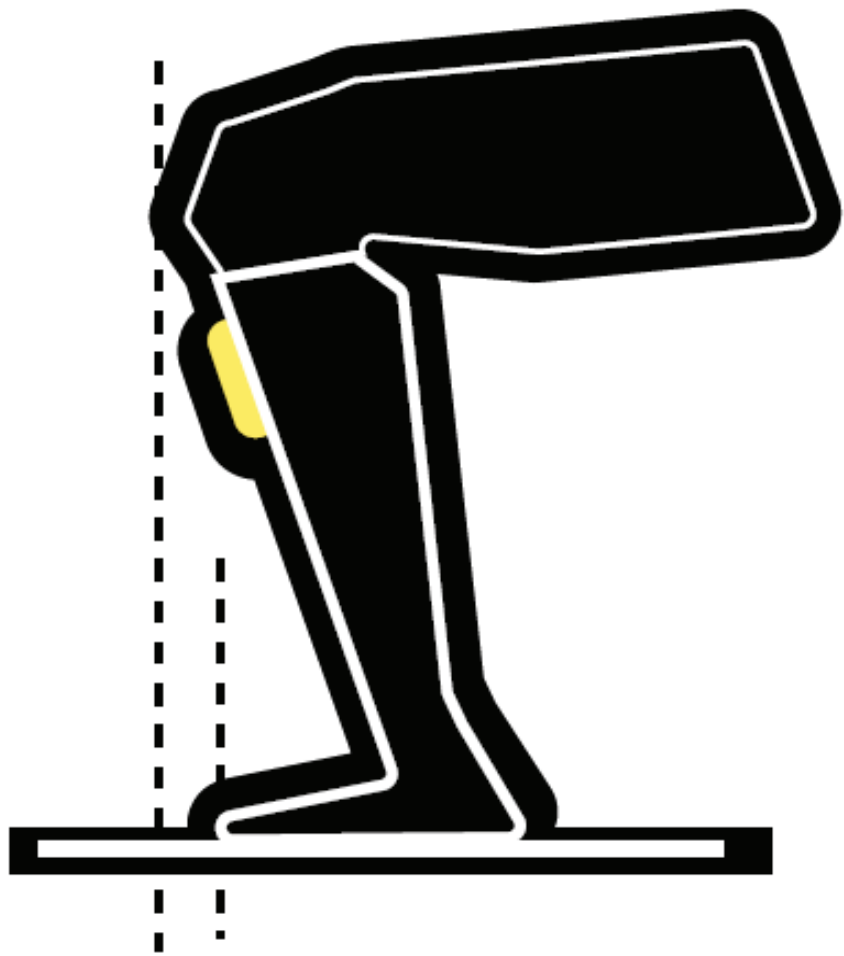

## Přehled produktu

### Účel použití

S STEP je určen výhradně pro ortotické použití na nohu a kotník a je vhodný pouze pro kontakt se zdravou a neporušenou kůží.

### Indikace a účinky

S STEP podporuje nohu v případě poklesu chodidla s maximálně lehkou spasticitou, např. po mrtvici, traumatickém poranění mozku, roztroušené skleróze, svalové atrofii, paréze peroneálního nervu apod.

S STEP je nejvhodnější pro pacienty s:

- žádným nebo mírným postižením motorické kontroly kolene,
- žádným nebo mírným postižením plantárních flexorů,
- schopností chůze, a to jak v interiéru, tak venku.

V případě deformity nohy je produkt indikován tehdy, pokud lze deformitu korigovat pomocí další vložky a/nebo varózního/valgózního pásku v kombinaci s pevnou obuví. Výrobek uživateli poskytuje přirozenější chůzi, rychlejší a stabilnější krok. Prsty a chodidlo se při švihové fázi zvedají a zabraňuje se „plácnutí“ chodidla a prudkému dopadu paty.

### Kontraindikace

- kontraktury,
- střední až těžká spasticita dolní končetiny,
- jakékoli vředy na dolní končetině,
- výrazný otok (edém),
- střední až těžké deformity nohy.

V následujících případech je nutná konzultace s lékařem: kožní onemocnění / poranění, zánětlivé příznaky, výrazné jizvy, lymfatické poruchy, poruchy citlivosti a krevního oběhu dolních končetin.

## Bezpečnost

- Pacient musí být poučen o správném použití a péči o výrobek prostřednictvím návodu k použití.
- Denní délka nošení a doba používání závisí na lékařské indikaci a míře pohodlí uživatele.
- Výrobek je určen pouze pro jednoho pacienta.
- Pokud je ortéza nasazena příliš těsně, může způsobit místní tlak a v některých případech i omezení průtoku krve nebo nervů. Nepřetahujte ji.
- V případě neobvyklých změn, jako je zvýšení bolesti, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Schopnost řídit vozidlo při nošení výrobku je třeba posoudit individuálně.
- Tento výrobek není odolný vůči ohni. Uchovávejte ho mimo oheň a jiné zdroje tepla.
- Výrobek by neměl přijít do styku s tuky, kyselými látkami, mastmi nebo krémy – může to zkrátit jeho životnost.
- Výrobek není vyroben z přírodního latexu.
- Používání výrobku nezaručuje prevenci před zraněním.

## Záruka

**60denní omezená záruka:** Ručíme za kvalitu našich produktů. Naše výrobky jsou po dobu 60 dnů od data nákupu kryty zárukou na vady materiálu a zpracování. Tato záruka je platná pouze pro původního kupujícího a je nepřenosná.

**Registrace záruky:** Abyste měli nárok na 60denní omezenou záruku, musíte produkt zaregistrovat do 30 dnů od nákupu na:  
[www.dropfoot.com/warranty](http://www.dropfoot.com/warranty)

**Uplatnění záruky:** Pokud se v záruční době objeví výrobní vada, kontaktujte náš zákaznický servis na [hello@elevatemovement.com](mailto:hello@elevatemovement.com) s údaji o registraci a popisem problému. Poskytneme vám pokyny k vrácení vadného výrobku k posouzení a k výměně nebo vrácení peněz.

**Vyloučení ze záruky:** Záruka se nevztahuje na:

- běžné opotřebení,
- poškození způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo zanedbáním,
- výrobky, které byly upraveny nebo modifikovány,
- výrobky, které nebyly zakoupeny na našem webu nebo u autorizovaných prodejců.

**Omezení:** Naše odpovědnost je omezena na výměnu nebo vrácení vadného výrobku. Neodpovídáme za žádné vedlejší ani následné škody vyplývající z používání našich výrobků.

**Právní nároky:** Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se liší stát od státu nebo země od země.