



1. Před obutím boty vložte upevňovací matice do otvorů pro tkaničky a přišroubováním upevněte háček se šroubem k matici.  
**UPOZORNĚNÍ!** Čím blíže nártu matici připevníte, tím více bude špička chodidla nadzvedávána.



2. Nasadte si ortézu ke kotníku a dle potřeby ustříhnete přebytečný materiál.



3. Natáhněte pásek ve znázorněném směru, provlečte ho sponou a zapněte na suchý zip. Odstávající zbytek pásku odstříhnete.



4. Nasadte oka ortézy k háčkům, připevněným v botě.



5. **CZ:** Pro nastavení správné síly napnutí použijte systém BOA. Produkt je připraven k použití.

**UPOZORNĚNÍ!** Pro správnou funkci výrobku se doporučuje pravidelně kontrolovat uchycení prvků ortézy k obuvi.

Ortýzy jsou perfektní řešení pro efektivní léčbu v případě poranění či jiných stavů. Reh4Mat výrobky jsou oceňovány a doporučovány specialisty (lékaři, fyzioterapeuty) a pacienti. Naše výrobky jsou vyrobeny v Polsku z vysoce kvalitních materiálů. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat: export@reh4mat.com.

### INDIKACE:

Ortýza dolní končetiny stabilizuje klouby dolní končetiny. Stálá komprese ulevuje bolesti a podporuje hojení. Používá se v případech reumatických, ortopedických a neurologických poruch, jako léčba po operacích a ve fyzikální terapii.

### PÉČE A ÚDRŽBA

- Výrobek má být udržován v čistotě a používán dle doporučení výrobce.
- Výrobek čistěte systematicky, nejméně jednou za měsíc nebo častěji, je-li to nezbytné, v souladu s doporučeními výrobce, aby bylo zajištěno udržení výrobku v dobrém stavu.
- Pokud výrobek obsahuje postranní dlahy nebo peloty, které je možno demontovat bez použití náčiní, odstraňte je před praním.
- Perte v ruce v teplé vodě s mýdlem při teplotě 30°C.
- Použijte až po celkovém vyschnutí.
- Váleček neperte, nežehlejte, nebělíte, nečistěte chemicky, nesušte v sušičce.
- Udržujte v suchu a čistotě.
- Chraňte před vlhkem, extrémní teplotou, slunečním světlem, sušte mimo tepelné zdroje.



### KONTRAINDIKACE

- Výrobek používejte pouze podle doporučení lékaře či fyzioterapeuta.
- Nepoužívejte výrobek nesprávné velikosti. Pouze správně zvolená velikost, shodně s tabulkou velikostí, dostupnou na obalu výrobku a v informačních materiálech výrobce, zaručuje efektivitu a bezpečnost.
- Nepoužívejte výrobek u osob a dětí s mentálními poruchami bez dozoru opatrovníka.
- Nepoužívejte výrobek u pacientů s poruchami povrchového a hlubokého číti bez dozoru opatrovníka.
- Neaplikujte výrobek na neočištěnou pokožku. Kontrolujte stav pokožky. V případě výskytu kožních lézí je nezbytné kontaktovat lékaře.
- V případě varikozních žil, hluboké žilní trombózy či otoku je používání ortézy povoleno pouze po konzultaci s lékařem.
- Nepoužívejte výrobek způsobem, pro který není určený.
- Nepoužívejte výrobek v případě jeho poškození nebo tvarové deformace.
- Nepokoušejte se tento výrobek sami opravovat.
- Neodborné zásahy do konstrukce výrobku mohou mít za následek trvalé poškození zdraví uživatele.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo horkých povrchů. To by mohlo mít za následek vážné poranění uživatele a vážné poškození zdraví.
- Používání ortézy v noci je možné pouze po předchozí konzultaci s lékařem nebo terapeutem.



### BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- **Pozor!** Tento manuál obsahuje základní informace nezbytné pro správné a bezpečné používání výrobku, údržbu a čištění.
- **Pozor!** Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Následující pokyny obsažené v manuálu poskytují bezpečnost a efektivitu výrobku. Pokud máte nějaké dotazy, prosíme, konzultujte vašeho poskytovatele zdravotních služeb.
- **Pozor!** Používání výrobku neshodně s tímto manuálem může mít za následek vážné komplikace.
- **Pozor!** Tento manuál si pečlivě uschovejte.
- **Pozor!** Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. Pokud je výrobek poškozen, přerušete jeho používání a kontaktujte výrobce. Pouze nepoškozené výrobky a správné používání zaručují správné a bezpečné fungování.
- **Pozor!** Výrobce odpovídá pouze za skryté vady nebo poškození vzniklá během pravidelného používání v důsledku výrobní vady.
- **Pozor!** Výrobce odpovídá za správné fungování výrobku a jeho bezpečnost pouze v případě zakoupení výrobku u autorizovaného prodejce.
- **Pozor!** Bolest je vždy varujícím příznakem. Pokud bolest přetrvává nebo se zvyšuje, je doporučeno konzultovat vašeho lékaře nebo fyzioterapeuta.
- **Pozor!** Použití pouze pro jednoho pacienta.
- **Pozor!** Výrobek by měl být používán shodně s doporučením lékaře nebo fyzioterapeuta.
- Před prvním použitím zkontrolujte velikost výrobku. Pouze správná velikost zaručuje bezpečnost a efektivitu. Špatná velikost výrobku snižuje efekt léčby, může působit diskomfort a špatné postavení. Výrobek musí být vybrán ošetřujícím lékařem, specializovaným prodejcem nebo fyzioterapeutem.
- Nepoužívejte výrobek u osob a dětí s mentálními poruchami bez dozoru opatrovníka.
- Neaplikujte výrobek na neočištěnou pokožku. Kontrolujte stav pokožky. V případě výskytu kožních lézí je nezbytné kontaktovat lékaře.
- V případě varikozních žil, hluboké žilní trombózy či otoku je používání ortézy povoleno pouze po konzultaci s lékařem.
- Před použitím odstraňte obal a příslušenství jako papíry, krabice nebo nálepky.
- Nepoužívejte výrobek způsobem, pro který není určený.
- Nepoužívejte výrobek nesprávné velikosti.
- Nepoužívejte výrobek u osob a dětí s mentálními poruchami bez dozoru opatrovníka.
- Nepoužívejte výrobek v případě jeho poškození nebo tvarové deformace.
- Nepokoušejte se tento výrobek sami opravovat.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.



Vážné příhody spojené s výrobkem musí být nahlášený výrobcem a kompetentním autoritám ve vaší zemi.

Prosíme postupujte podle INSTRUKCÍ dodaných s výrobkem.

Seznam dostupných náhradních dílů pro vybrané výrobky naleznete na [www.reh4mat.com](http://www.reh4mat.com).



Prohlášení, že výrobek splňuje základní požadavky.



Výrobce.



Datum výroby.



Prosíme před použitím si přečtěte pokyny v manuálu.



Pozor!



Chraňte před sluncem.



Relativní vlhkost při skladování.

80 %  
10 %



Limitovaná teplota při skladování.

50°C  
-20°C



Skladujte v suchu.



Obal je recyklovatelný



Zdravotnický prostředek



Číslo šarže



Katalogové číslo



Obal by měl být hozen do koše



Symbol polského hlavního města zdůrazňuje lokalitu



Výrobek bez chemikálií



Doporučeno specialisty.



Přátelské k pokožce



Inovativní výrobek



Minimální přístroj, maximální efekt



Ekologicky šetrný výrobek



Hypoalergenní výrobek



Odolný výrobek



ER výrobek

