

## NÁVOD NA POUŽITÍ

### VÝROBCE

**ERHEM SP. J.**  
ul. Puszkina 6  
39-200 Dębica  
Tel./Fax.: (14) 681 23 85  
poczta@erhem.pl



Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008

Systematycznie monitorowany



POLSKI  
PRODUKT



**ORTÉZA RAMENNÍ**  
**ERH 59/1**

[www.erhem.pl](http://www.erhem.pl)

## ORTÉZY HORNÍCH KONČETIN

#### INDIKACE

- Po CMP
- Po rekonstrukci rotarolové manžety
- Luxace ramenního kloubu
- Obrna, paréza

#### POPIS

- Ramenní ortéza stabilizující a odlehčující horní končetinu.

#### VLASTNOSTI

- Ortéza zajišťuje repozici hlavičky humeru, zevní rotaci a působí proti subluxaci ramenního kloubu.
- Pomocí popruhů lze regulovat obvod pažní a ramenní části.

#### POKYNY a DOPORUČENÍ

- Přípravek by měl být používán dle pokynů a dohledu specialisty: Chirurg, ortoped, léčebná rehabilitace, revmatolog, neurolog, protetik.
- Pokyny k užívání pomůcky vám dá váš lékař nebo specializovaný zdravotnický personál.
- Způsob a doba užívání pomůcky souvisí s typem a povahou dysfunkce, určenou Vaším lékařem.
- Kůže by měla být v místě aplikace suchá a čistá, bez viditelných změn (odřeniny, odřeniny, rány, trofické změny, ekzémy).
- Pokud se má přípravek používat společně se souběžně existujícími kožními lézemi, je třeba dbát zvláštní opatrnosti.
- Pokud zaznamenáte zhoršení stávajících kožních lézí, obraťte se na svého lékaře.
- Přípravek nepoužívejte po použití gelu a hřející masti.
- Nedostatek každodenní osobní hygieny, nedostatečná nebo nedbalá údržba výrobku, použití nevhodných mycích prostředků, může způsobit oděrky nebo jiné nepohodlí v důsledku zvýšeného pocení, vývoje bakteriální flóry nebo přecitlivělost.

- Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, obraťte se na svého lékaře.
- Aby výrobek mohl plnit svůj účel, musí být zvolena správná velikost.
- Velikostní tabulka zaručuje přesnou a vhodnou volbu velikosti, která zajistí plnou funkčnost výrobku. Umožňuje individualizovat parametry produktu a implementovat nesériové upravení výrobku odborníkem.

#### MATERIÁL

- Třívrstvý materiál HIGROMED, který se skládá perforovaného neoprenu s lehkou kompresí v kloubech, zajišťující terapeutické teplo a stálost a pružnost výrobku,
- Polyuretanové pěny
- Přírodní bavlněné tkaniny
- Plastové háčky, sponky

#### ÚDRŽBA

- Měkké prvky je třeba omývat ručně při teplotě do 40 °C ve vodě mýdlem, pomocí houbičky nebo měkkého kartáčku, nechlorovat, nežehlit, neomývat nasucho, nebělit.
- Usušte při pokojové teplotě mimo intenzivní zdroje tepla.

