

ERHEM

VÝROBCE

ERHEM SP. J.
ul. Puszkińska 6
39-200 Dębica
Tel./Fax.: (14) 681 23 85
poczta@erhem.pl



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008

Systematycznie monitorowany

CE

NÁVOD NA POUŽITÍ



ERH 47

Ortéza zápěstí



ERH 47/1

Ortéza zápěstí s palcem



ERH 47/3

Ortéza zápěstí



ORTEZA ZÁPĚSTÍ

ORTOTÉZY HORNÍCH KONČETIN

www.erhem.pl

INDIKACE

- Po CMP
- Obrna, paréza
- Degenerativní onemocnění kloubů
- Dupuytrenova kontraktura
- Revmatoidní artritida

POPIS

- Korekční, celopolstrovaná ortéza s tvarovatelnou volární dlahou a čtyřmi utahovacími popruhy, zajišťující potřebnou polohu končetiny. Nastavitelnost palce v opozici.

VLASTNOSTI

- Stabilizují a znehybňují předloktí a palec HK.
- Produkty jsou určeny jak pro ortopedické tak pro neurologické pacienty.
- Tvarovatelné dlahy umožňují nastavení končetiny do požadované pozice.
- Ortéza je celopolstrovaná s utahovacími popruhy

POKYNY A DOPORUČENÍ

- Přípravek by měl být používán dle pokynů a dohledu specialisty: Chirurg, ortoped, léčebná rehabilitace, revmatolog, neurolog, protetik.
- Pokyny k užívání pomůcky vám dá váš lékař nebo specializovaný zdravotnický personál.
- Způsob a doba užívání pomůcky souvisí s typem a povahou dysfunkce, určenou Vaším lékařem.
- Kůže by měla být v místě aplikace suchá a čistá, bez viditelných změn (odřeniny, odřeniny, rány, trofické změny, ekzémy).
- Pokud se má přípravek používat společně se souběžně existujícími kožními lézemi, je třeba dbát zvláštní opatrnosti.
- Pokud zaznamenáte zhoršení stávajících kožních lézí, obraťte se na svého lékaře.
- Přípravek nepoužívejte po použití gelu a hřející masti.
- Nedostatek každodenní osobní hygieny, nedostatečná nebo nedbalá údržba výrobku, použití nevhodných mycích prostředků, může způsobit oděrky nebo jiné nepohodlí v důsledku zvýšeného pocení, vývoje bakteriální flóry nebo přecitlivělost.

- Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, obraťte se na svého lékaře.
- Aby výrobek mohl plnit svůj účel, musí být zvolena správná velikost.
- Velikostní tabulka zaručuje přesnou a vhodnou volbu velikosti, která zajistí plnou funkčnost výrobku. Umožňuje individualizovat parametry produktu a implementovat nesériové upravení výrobku odborníkem.

MATERIÁL

- Kovové dlahy jsou vyztuženy polyuretanovou pěnou, bilaterálně potaženou polyamidovou hlinkou, se čtyřmi pruhy připevňujícími k výrobku.

ÚDRŽBA

- Měkké prvky je třeba omývat ručně při teplotě do 40 °C ve vodě mýdlem, pomocí houbičky nebo měkkého kartáčku, nechlorovat, nežehlít, neomývat nasucho, nebělit.
- Usušte při pokojové teplotě mimo intenzivní zdroje tepla.

